



# FROGGY MOUTH

FROGGY MOUTH EST UN APPAREIL MÉDICAL DE CLASSE I, CERTIFIÉ CE - ISO 13485 - ISO 9001  
FABRIQUÉ INTÉGRALEMENT EN FRANCE • [WWW.FROGGY MOUTH.COM](http://WWW.FROGGY MOUTH.COM)  
UNE QUESTION? [CONTACT@FROGGY MOUTH.COM](mailto:CONTACT@FROGGY MOUTH.COM)

## DÉGLUTITION

LORSQUE VOUS RECEVEZ VOTRE COLIS FROGGYMOUTH, VOUS TROUVEREZ À L'INTÉRIEUR UN PROTOCOLE D'UTILISATION DE L'APPAREIL POUR VOUS GUIDER DANS LE PROCESSUS DE RÉÉDUCATION.

De plus, cette fiche de suivi vous accompagne pour compléter le protocole, en vous fournissant des questions supplémentaires à poser pendant l'utilisation de l'appareil. Cela vous aidera à suivre les progrès de votre traitement de manière plus précise et efficace.

ÉVALUATION	T0 (pose de l'appareil)	T1 (dans 3 mois)	T2 (dans 6 mois)
Observez-vous des contractions de la musculature labio-mentonnaire ?			
<ul style="list-style-type: none"> <li>• lorsque vous demandez au patient de déglutir</li> </ul>			
<ul style="list-style-type: none"> <li>• lorsque vous observez une déglutition réalisée inconsciemment (pendant une discussion anodine, ou en lui donnant une activité à faire qui capte son attention)</li> </ul>			
Lors de la déglutition, les arcades sont-elles en occlusion ?			
Est-ce que le patient a tendance à rechercher le contact de sa muqueuse labiale avec sa langue ? Est-ce qu'il passe sa langue sur ses lèvres ?			
Est-ce que le patient a les lèvres gercées ? Des irritations autour des lèvres ?			

## MASTICATION / EXAMEN DENTAIRE

ÉVALUATION	T0 (pose de l'appareil)	T1 (dans 3 mois)	T2 (dans 6 mois)
Le patient a-t-il une mastication unilatérale alternée ?			
Présente-t-il une déformation dentaire ou squelettique (béance antérieure, béance postérieure, articulé croisé, articulé inversé, DDM...) ? Si oui, cette déformation est-elle légère / moyenne / importante ?	<ul style="list-style-type: none"> <li>• aucune</li> <li>• légère</li> <li>• moyenne</li> <li>• importante</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• aucune</li> <li>• légère</li> <li>• moyenne</li> <li>• importante</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• aucune</li> <li>• légère</li> <li>• moyenne</li> <li>• importante</li> </ul>

## ARTICULATION / ÉLOCUTION

ÉVALUATION	T0 (pose de l'appareil)	T1 (dans 3 mois)	T2 (dans 6 mois)
Constatez-vous une posture basse de la langue au repos ?			
Observez-vous une interposition linguale lorsque que le patient parle ?			

# FROGGYMOUTH



## RESPIRATION

ÉVALUATION	T0 (pose de l'appareil)	T1 (dans 3 mois)	T2 (dans 6 mois)
Le patient a-t-il souvent la bouche ouverte ou entrouverte pendant la journée ?			
Sa respiration pendant la nuit est-elle bruyante ?			
Est-ce que le patient ronfle la nuit ?			
Le patient se lève-t-il avec la bouche sèche ?			
Est-ce que le patient bave durant la nuit (tâche humide sur l'oreiller) ?			
Le patient a-t-il les yeux cernés et le teint pâle ?			
Transpire-t-il durant la nuit ?			

### FICHE DE SUIVI DU TRAITEMENT AVEC FROGGYMOUTH

Cette fiche de suivi vous aidera à suivre l'avancement du traitement avec l'appareil de rééducation fonctionnelle **FROGGYMOUTH**. Il est recommandé de réaliser une évaluation lors de la pose du **FROGGYMOUTH**, puis à nouveau après 3 mois et 6 mois pour mieux évaluer les progrès du traitement. Pour obtenir une évaluation précise, il est important de remplir cette fiche de suivi en collaboration avec le patient ou ses parents. Ensemble, vous pourrez suivre les progrès du traitement avec **FROGGY-MOUTH** et vous rapprocher de vos objectifs de rééducation !

## COMPORTEMENT

ÉVALUATION	T0 (pose de l'appareil)	T1 (dans 3 mois)	T2 (dans 6 mois)
Au réveil, est-ce qu'il est souvent fatigué ou, au contraire, hyperactif ?			
Est-ce qu'il y a encore des accidents urinaires la nuit ? (pour un enfant de moins de 10 ans)			
A-t-il des difficultés d'attention à l'école ?			
A-t-il des difficultés de régulation émotionnelle ?			
Présente-t-il fréquemment des maladies ou des infections (des otites par exemple) ?			



## EXAMEN DU PATIENT PORTANT LE FROGGYMOUTH

ÉVALUATION	1er RDV	2nd RDV (entre 10 et 30 jours du port de l'appareil)	3ème RDV /RDV final
Porte-il bien le FroggyMouth tous les jours ?			
Bave-t-il pendant le port ?	☹		
Aspire-t-il bruyamment sa salive ?			
Place t-il l'apex lingual dans l'ouverture de l'appareil ?			
Quel type de ventilation a votre patient ? Buccale, mixte à tendance buccale, mixte à tendance nasale, ou nasale ?	☹☹	☹☹☹	
Lors de l'exercice d'élocution, voyez-vous la langue essayer de franchir la barrière des dents ? Ou bien reste-t-elle à sa place pour pouvoir remplir sa fonction lors de la déglutition ?			☹☹☹☹



C'est tout à fait normal la première semaine, persévérez et vous réussirez !

Point d'action : si le patient continue de baver, aspire bruyamment ou encore s'il place l'apex lingual dans l'espace du FROGGYMOUTH après 14 jours du port de l'appareil, faites " l'exercice du bras de fer " !



Astuce : vous pouvez utiliser un petit miroir pour visualiser l'ouverture des narines et la direction de l'écoulement de l'air.



Point d'action : si la respiration n'est toujours pas nasale après 3 mois (M1), pratiquez " l'exercice des parfums " pour l'automatiser !



Point d'action : répétez " l'exercice d'élocution " pour évaluer si le traitement doit se poursuivre, ou si le patient est prêt à passer à l'étape finale.



**ATFC Ltd**  
311 Viola Street  
Oshawa, ON, L1H 3A7 Canada  
1-800-267-8463 1-416-347-9647  
info@atfcnorthamerica.com  
www.atfcnorthamerica.com

